


- CIRCUIT SANG ET CIRCUIT DIALYSAT SÉPARÉS
- ABSENCE DE RISQUE DE CROSS-CONTAMINATION
- MAITRISE DE LA PERTE DE POIDS GRÂCE À L'IMPÉDANCE HYDRAULIQUE

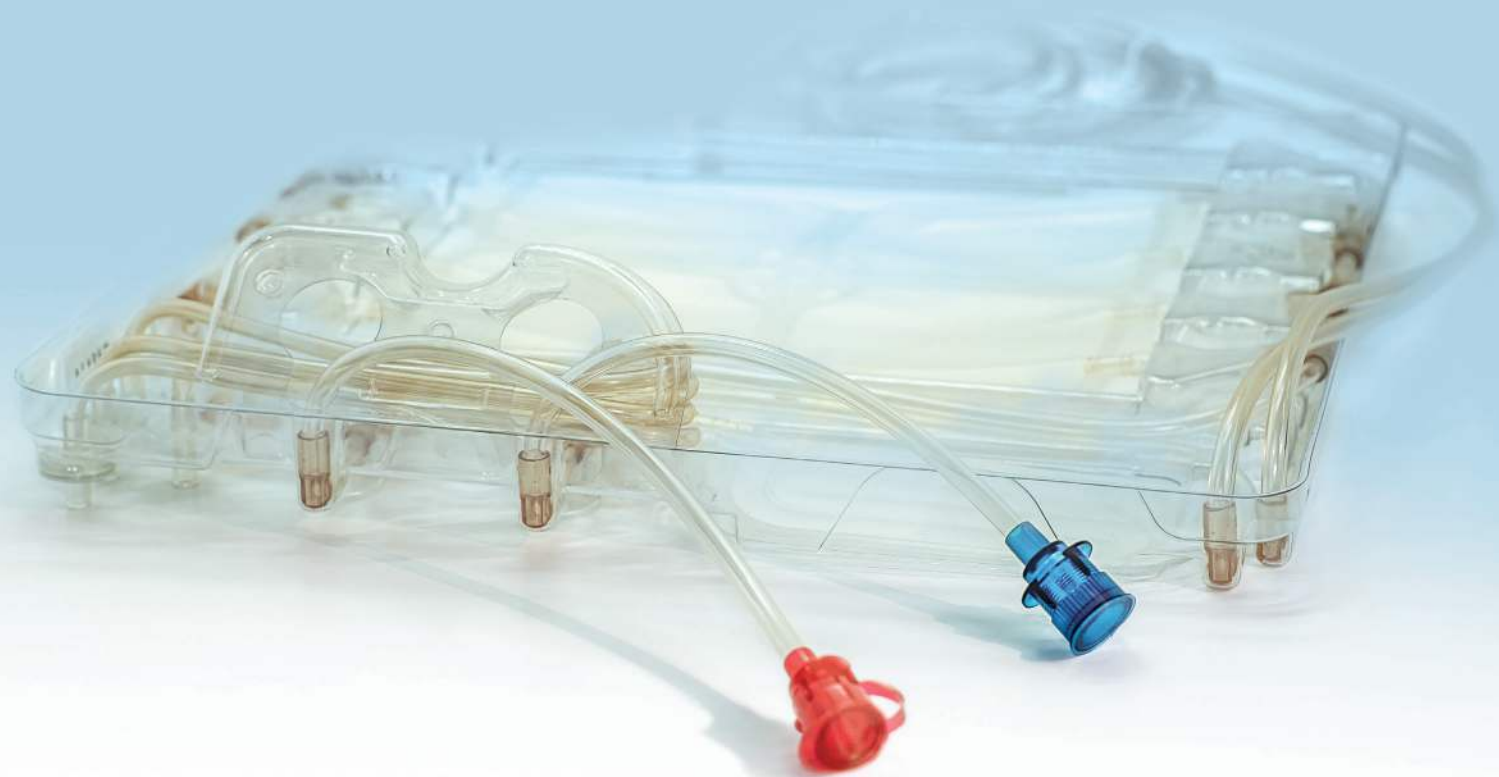

S³

S³.PHYSI.FLOW-150
CASSETTE DE DIALYSAT POUR LE
MONITEUR S³ D'HÉMODIALYSE À DOMICILE

S³

CASSETTE DE DIALYSAT POUR LE MONITEUR DE DIALYSE À DOMICILE S³

FICHE TECHNIQUE S³.PHYSI.FLOW-150 - Réf. 800014

La cassette dialysat S³.PHYSI.FLOW-150 est un accessoire du moniteur S³ de Physidia utilisé pour le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale par hémodialyse quotidienne. Elle inclut un ensemble de tubes et de poches à usage unique permettant la bonne gestion du dialysat pendant la séance de dialyse (circulation, chauffage, ultrafiltration..).

Spécificités techniques

Produit à usage unique

Longueur hors tubulures 40 cm

Largeur hors tubulures 40 cm

Longueur ligne d'entrée du dialysat 1.5m

Longueur ligne d'évacuation dialysat usé 2m

Matériaux

Tuyau PVC de qualité médicale

Poches module dialysat PVC de qualité médicale

Tubes à perte de charge PBT de qualité médicale

Prise de Pression PTFE Goretex de qualité médicale, PVC

Connectique

Connectique dialyseur Raccords Hansen

Connectique poche de dialysat Luer-lock

Mode de stérilisation

Irradiation beta

Stockage 0°C < Température < 30°C

Température d'utilisation Entre 15 et 30°C

Péremption 2 ans

Conditionnement 6 unités par carton

Conditionnement par palette 180 unités (30 cartons)

> Accessoires annexes

Une piewvre d'interconnexion est fournie avec la cassette dialysat S³.PHYSI.FLOW-150. L'utilisation de la piewvre est décrite dans le manuel d'utilisation du moniteur S³.

Une extension de ligne S³.PHYSI.EXT, réf. CD30 (3m), est disponible (en option).



Les cassettes dialysat S³.PHYSI.FLOW-150 sont conçues pour être utilisées en hémodialyse quotidienne dans le traitement des insuffisances rénales chroniques. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE selon la directive 93/42/CEE & 2007/47/CE.

Organisme évaluateur : CE0459 / LNE GMED. Lire attentivement les instructions d'utilisation livrées avec le produit avant utilisation.

Date de mise à jour du texte : 5 septembre 2018 / Version 1

CE 0459

Fabricant

PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou - France

Distributeur

PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou - France

S³ est une marque déposée de la société Physidia SAS